


## Das Ablesen der Ergebnisse

Während der Wartezeit (15 Minuten) erscheinen 1, 2 oder gar keine farbigen Linien in dem ovalen Fenster der Kassette.

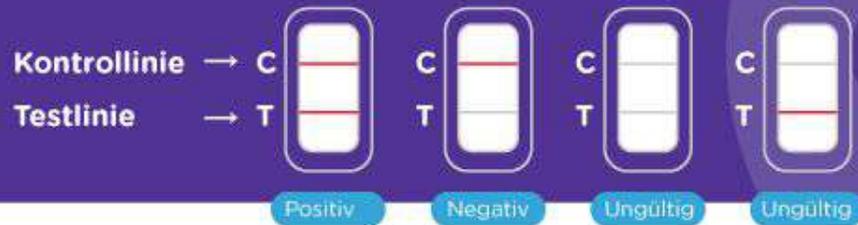

### Positiv (+)

2 farbige Linien erscheinen bei "C" und bei "T". Dies bestätigt eine Chlamydien Infektion. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, damit dieser weitere Tests durchführen kann.

### Negativ (-)

1 farbige Linie erscheint bei "C". Dies bestätigt, dass keine Chlamydien Infektion vorliegt. Um sicher zu gehen, dass tatsächlich keine Infektion vorliegt, empfiehlt sich ein zweiter Test.

### Ungültig

Wenn keine farbige Linie erscheint oder nur eine farbige Linie bei "T", jedoch nicht bei "C" erscheint, wiederholen Sie den Test.

*Dieser Test ist nicht wiederverwendbar.*

Unter [de.treated.com](https://de.treated.com) können Sie einen neuen Test bestellen.

Hergestellt von:  
Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd

Vertrieben von:  
Lintor Ltd.  
27 Gen. Kisetlov str., Varna, 9000  
Bulgarien

✉ [info@yourselftests.com](mailto:info@yourselftests.com)

🌐 [www.yourselftests.com](http://www.yourselftests.com)

# Chlamydien Test

Sicherer und diskreter Heimtest

## Anleitung

**Wichtig:** Bevor Sie den Test durchführen, lesen Sie bitte die Anleitung.

### Inhalt

- ✓ Einzel verpackte Test-Kassette
- ✓ Steril verpacktes Wattestäbchen
- ✓ Pufferfläschchen (Reagenzstoff 1, Reagenzstoff 2)
- ✓ Plastik Extraktionsröhrchen mit Deckel

*Wichtig: Ebenfalls benötigt werden eine Uhr, ein Wecker oder eine Stoppuhr, um die Zeit im Auge zu behalten.*

 [de.treated.com](https://de.treated.com)<sup>®</sup>

Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice Team unter [KundenserviceDE@treated.com](mailto:KundenserviceDE@treated.com)

## Einleitung

Die Chlamydien Infektion ist eine sexuell übertragbare Infektion, welche durch das Bakterium *Trachomatis* verursacht wird.

Meist verläuft die Infektion ohne Symptome; falls jedoch Symptome auftreten, dann sind dies bei Frauen in der Regel Ausfluss oder ein brennendes Gefühl. Bei Männern sind es beispielsweise Ausfluss aus dem Penis, Brennen beim Wasserlassen oder Schwellungen der Hoden. Chlamydien können durch Vaginal- oder Oralverkehr übertragen werden. Auch bei der Geburt eines Kindes kann eine Chlamydien Infektion von der Mutter an das Kind übertragen werden. Man kann sich vor Chlamydien schützen, indem man auf Geschlechtsverkehr verzichtet, Kondome verwendet oder nur Geschlechtsverkehr mit nicht-infizierten Partnern hat. Wenn Sie sexuell aktiv sind, empfiehlt es sich, sich einmal im Jahr auf alle Geschlechtskrankheiten testen zu lassen. Die Chlamydien Infektion ist eine der am häufigsten auftretenden Geschlechtskrankheiten. Nach einem einfachen Heimtest können Sie Ihre Chlamydien ganz einfach mit Antibiotika behandeln.

## Wichtig

- Lesen Sie bitte die Instruktionen, bevor Sie den Heimtest durchführen.
- Dieser Test kann nur einmal verwendet werden. Es ist deshalb wichtig, dass Sie die Anleitung genauestens lesen und verstehen bevor Sie mit der Durchführung des Tests beginnen. Halten Sie sich stets an die Anleitung. Wenn Sie bestimmte Schritte nicht wie beschrieben durchführen, kann dies die Genauigkeit des Tests beeinträchtigen.
- Das Test Kit sollte bei einer Temperatur von 2-30°C gelagert werden.
- Die Test-Kassette muss bis zur Verwendung in ihrer Verpackung bleiben.
- Nicht zur internen Anwendung geeignet. Vermeiden Sie den Kontakt der Hände mit Nase oder Augen, wenn Sie den Test durchführen. Sie sollten nicht essen, trinken oder rauchen, während Sie den Test durchführen.
- Das Test Kit sollte nicht nach Ablauf des aufgedruckten Haltbarkeitsdatums verwendet werden. Auch wenn das Test Kit beschädigt oder bereits geöffnet ist, sollte es nicht verwendet werden.
- Nicht zur Wiederverwendung geeignet.
- Verwenden Sie Zytologie Pinsel nicht, wenn Sie schwanger sind.

## Durchführung

Die Anweisungen sollten genauestens befolgt werden, da es sonst zu inkorrekten Ergebnissen kommen kann. Lesen Sie alle Schritte genauestens durch.

**Schritt 1:** Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und warmem Wasser. Spülen Sie sie gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch.

**Schritt 2:** Wenn Sie den Test jetzt durchführen, öffnen Sie alle Verpackungen. Breiten Sie den gesamten Inhalt auf einer sauberen und flachen Oberfläche aus.

**Schritt 3:** (Frauen) Öffnen Sie den Scheideneingang mit zwei Fingern und führen Sie das sterilisierte Wattestäbchen vorsichtig ein bis die Spitze nicht mehr sichtbar ist. Wenn vaginaler Ausfluss sichtbar ist, entfernen Sie diesen zunächst mit dem Wattestäbchen.



**Schritt 3:** (Männer) Führen Sie das sterile Wattestäbchen 2 bis 4 cm tief in die Harnröhre ein.

**Schritt 4:** Bewegen Sie das sterile Wattestäbchen 5 bis 10 Sekunden lang.

**Schritt 5:** Platzieren Sie das Wattestäbchen in dem mitgelieferten Röhrchen.

**Schritt 6:** Geben Sie 8 Tropfen des Reagenzstoffs 1 in das Röhrchen

**Schritt 7:** Drücken Sie das Röhrchen 15 Mal zusammen während Sie das Wattestäbchen hin und her bewegen.

**Schritt 8:** Lassen Sie das Wattestäbchen für 2 Minuten in dem Röhrchen.

**Schritt 9:** Geben Sie 8 Tropfen des Reagenzstoffs 2 in das Röhrchen.

**Schritt 10:** Drücken Sie das Röhrchen 15 Mal zusammen während Sie das Wattestäbchen hin und her bewegen.

**Schritt 11:** Entfernen Sie das Wattestäbchen und drücken Sie es am Rand des Röhrchens etwas aus. Verschließen Sie das Röhrchen mit dem mitgelieferten Deckel.

**Schritt 12:** Geben Sie 3 Tropfen der Probe aus dem Röhrchen in die vorgesehene Vertiefung auf der Kassette (S).

Das Ergebnis wird nach 10 - 15 Minuten sichtbar. Warten Sie nicht länger um das Ergebnis abzulesen. Sollte die Symptome weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.