

Schritt 1 Urinprobe



Urinprobe nehmen

Bitte lesen Sie zunächst diese Anleitung, bevor Sie versuchen, die Urinprobe zu nehmen.

Wenn der Aufkleber noch nicht ausgefüllt ist, achten Sie darauf, dass Sie die folgenden Informationen mit Kugelschreiber darauf eintragen:

- Vorname
- Nachname
- Geburtsdatum

Der Inhalt Ihres Test-Kits

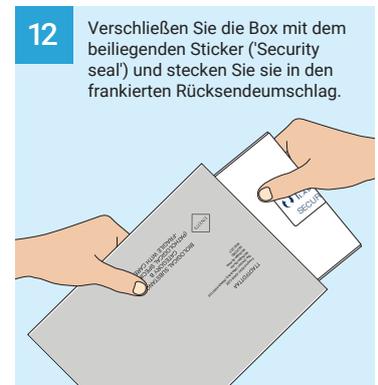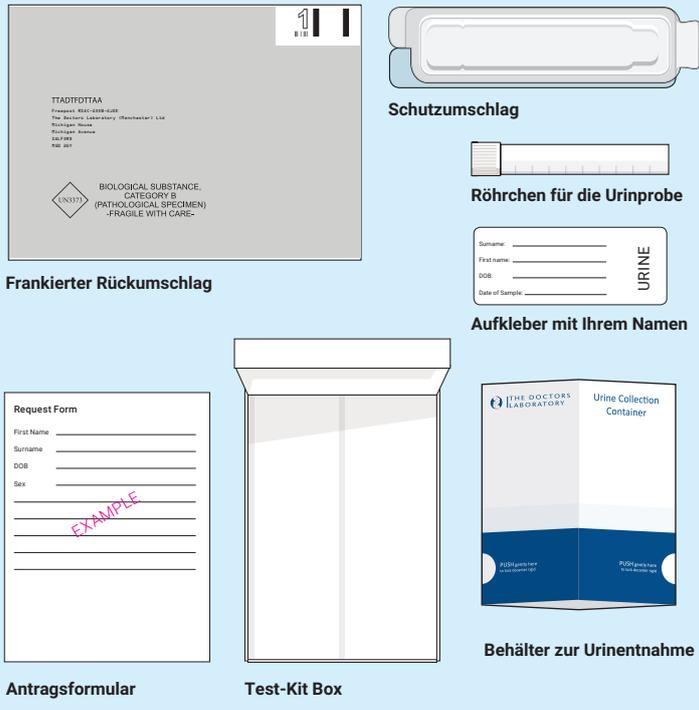

Schritt 2 Checkliste

Bevor Sie Ihre Probe absenden, setzen Sie bitte bei den bereits erledigten untenstehenden Schritten einen Haken.

- Antragsformular ausgefüllt
- Urinprobe in die Röhre gefüllt
- Urinprobe in die Box gelegt und die Box mit dem Sicherheitsaufkleber verschlossen

Sie können den frankierten Rückumschlag nun verschließen. Bitte senden Sie Ihre Probe(n) so schnell wie möglich an The Doctors Laboratory.

Sollten Sie weitere Fragen zu der Urinprobe haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice Team unter KundenserviceDE@treated.com oder +4969 2222 46285.

Ausfüllen des Aufklebers:

Der Aufkleber ist auf Englisch.

- Neben "Surname" tragen Sie bitte Ihren Nachnamen ein.
- Neben "First Name" tragen Sie bitte Ihren Vornamen ein.
- Neben "DOB" tragen Sie bitte Ihr Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) ein.
- Neben "Date of sample" tragen Sie bitte das Datum ein, an dem Sie die Probe genommen haben.

