


Das Ablesen der Ergebnisse

Während der Wartezeit (15 Minuten) erscheinen 1, 2 oder gar keine farbigen Linien in dem ovalen Fenster der Kassette.

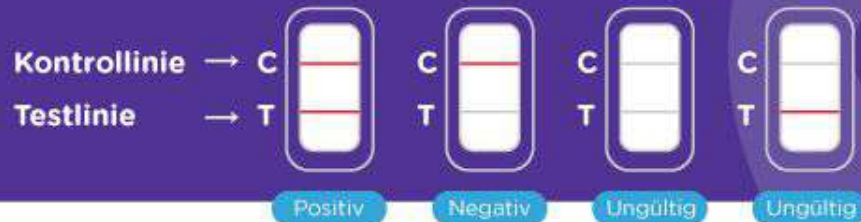

Positiv (+)

2 farbige Linien erscheinen bei "C" und bei "T". Dies bestätigt eine Gonorrhö Infektion. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, damit dieser weitere Tests durchführen kann.

Negativ (-)

1 farbige Linie erscheint bei "C". Dies bestätigt, dass keine Gonorrhö Infektion vorliegt. Um sicher zu gehen, dass tatsächlich keine Infektion vorliegt, empfiehlt sich ein zweiter Test.

Ungültig

Wenn keine farbige Linie erscheint oder nur eine farbige Linie bei "T", jedoch nicht bei "C" erscheint, wiederholen Sie den Test.

Dieser Test ist nicht wiederverwendbar.

Unter de.treated.com können Sie einen neuen Test bestellen.

Hergestellt von:
Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd

Vertrieben von:
Lintor Ltd.
27 Gen. Kisetlov str., Varna, 9000
Bulgarien

✉ info@yourselftests.com

🌐 www.yourselftests.com

Gonorrhö Test

Sicherer und diskreter Heimtest

Anleitung

Wichtig: Bevor Sie den Test durchführen, lesen Sie bitte die Anleitung.

Inhalt

- ✓ Einzeln verpackte Test-Kassette
- ✓ Steril verpacktes Wattestäbchen
- ✓ Pufferfläschchen (Reagenzstoff 1, Reagenzstoff 2)
- ✓ Plastik Extraktionsröhrchen mit Deckel

Wichtig: Ebenfalls benötigt werden eine Uhr, ein Wecker oder eine Stoppuhr, um die Zeit im Auge zu behalten.

 **de.treated.com®**

Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice Team unter KundenserviceDE@treated.com

Einleitung

Gonorrhö ist eine sexuell übertragbare Infektion welche durch das Bakterium *Neisseria Gonorrhoeae* hervorgerufen wird. Umgangssprachlich wird diese Infektion auch als Tripper bezeichnet.

Gonorrhö ist eine der am häufigsten auftretenden Infektionen und wird durch Geschlechtsverkehr (vaginal-, oral-, oder Analverkehr) übertragen. Auch kann man sich mit Gonorrhö im Hals infizieren, was zu Halsschmerzen führen kann. Am After kann man sich ebenfalls mit Gonorrhö infizieren, dies führt zu Proktitis (Entzündung der Mastdarmwand). Auch wenn die meisten Betroffenen keinerlei Symptome aufweisen, so kann die Infektion zu folgenden Symptomen führen: Schmerzen oder Brennen beim Urinieren, Zwischenblutungen aus der Scheide, zunehmender vaginaler Ausfluss (oftmals grün oder gelb), Jucken oder Brennen der Scheide, Ausfluss aus dem Penis, häufiges Urinieren mit einer geringen Menge an Urin, Schmerzen oder Schwellungen eines oder beider Hoden bei Männern. Sie können sich nur vor Gonorrhö schützen, indem Sie entweder gar keinen Geschlechtsverkehr haben, nur Geschlechtsverkehr mit Kondom haben oder nur mit einem/ einer Partner/in Geschlechtsverkehr haben, welche/r nicht infiziert ist. Wenn Sie sexuell aktiv sind, sollten Sie sich mindestens einmal im Jahr auf alle Geschlechtskrankheiten testen lassen. Nach einem diskreten Heimtest kann eine Gonorrhö Infektion einfach behandelt werden, meist mit Antibiotika.

Wichtig

- Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie diesen Test verwenden.
- Dieser Test kann nur einmal verwendet werden. Es ist deshalb wichtig, dass Sie die Anleitung genauestens lesen und verstehen bevor Sie mit der Durchführung des Tests beginnen. Halten Sie sich stets an die Anleitung. Wenn Sie bestimmte Schritte nicht wie beschrieben durchführen, kann dies die Genauigkeit des Tests beeinträchtigen.
- Das Test Kit sollte bei einer Temperatur von 2-30°C gelagert und nach dem Haltbarkeitsdatum nicht mehr verwendet werden.
- Die Test-Kassette muss bis zur Verwendung in ihrer Verpackung bleiben.
- Nicht zur internen Anwendung geeignet. Vermeiden Sie den Kontakt der Hände mit Nase oder Augen, wenn Sie den Test durchführen. Sie sollten nicht essen, trinken oder rauchen, während Sie den Test durchführen.
- Das Test Kit sollte nicht nach Ablauf des aufgedruckten Haltbarkeitsdatums verwendet werden. Auch wenn das Test Kit beschädigt oder bereits geöffnet ist, sollte es nicht verwendet werden.
- Nicht zur Wiederverwendung geeignet.
- Verwenden Sie Zytologie Pinsel nicht, wenn Sie schwanger sind.

Durchführung

Schritt 1: Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und warmem Wasser. Spülen Sie sie gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch.

Schritt 2: Wenn Sie den Test jetzt durchführen, öffnen Sie alle Verpackungen. Breiten Sie den gesamten Inhalt auf einer sauberen und flachen Oberfläche aus.

Schritt 3: (Frauen) Öffnen Sie den Scheideneingang mit zwei Fingern und führen Sie das sterilisierte Wattestäbchen vorsichtig ein bis die Spitze nicht mehr sichtbar ist. Wenn vaginaler Ausfluss sichtbar ist, entfernen Sie diesen zunächst mit dem Wattestäbchen.



Schritt 3: (Männer) Führen Sie das sterile Wattestäbchen 2 bis 4 cm tief in die Harnröhre ein.

Schritt 4: Bewegen Sie das sterile Wattestäbchen 5 bis 10 Sekunden lang.

Schritt 5: Platzieren Sie das Wattestäbchen in dem mitgelieferten Röhrchen.

Schritt 6: Geben Sie 8 Tropfen des Reagenzstoffs 1 in das Röhrchen

Schritt 7: Drücken Sie das Röhrchen 15 Mal zusammen während Sie das Wattestäbchen hin und her bewegen.

Schritt 8: Lassen Sie das Wattestäbchen für 2 Minuten in dem Röhrchen.

Schritt 9: Geben Sie 8 Tropfen des Reagenzstoffs 2 in das Röhrchen.

Schritt 10: Drücken Sie das Röhrchen 15 Mal zusammen während Sie das Wattestäbchen hin und her bewegen.

Schritt 11: Entfernen Sie das Wattestäbchen und drücken Sie es am Rand des Röhrchens etwas aus. Verschließen Sie das Röhrchen mit dem mitgelieferten Deckel.

Schritt 12: Geben Sie 2 Tropfen der Probe aus dem Röhrchen in die vorgesehene Vertiefung auf der Kassette (S).

Das Ergebnis wird nach 10 - 15 Minuten sichtbar. Warten Sie nicht länger um das Ergebnis abzulesen. Sollte die Symptome weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice Team unter KundenserviceDE@treated.com