


## Interprétation des résultats

Dans un délai de 15 minutes, 1, 2 ou aucune lignes colorées apparaîtront sur le compartiment oval du boitier de dépistage.

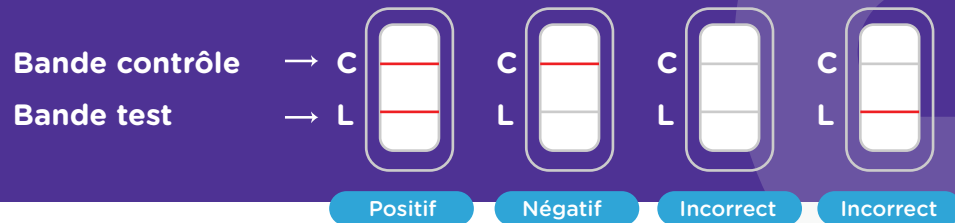

### Positif (+)

Deux bandes colorées apparaissent sur 'C' et 'T'. L'échantillon est considéré comme positif. Veuillez consulter un docteur pour d'autres examens complémentaires.

### Négatif (-)

Une seule bande colorée apparaît sur 'C'. L'échantillon est considéré comme négatif. Un résultat négatif exclut la possibilité d'une infection à la Gonorrhée. Pour confirmer que vous n'avez pas contracté la Gonorrhée, nous vous conseillons de réaliser un second test.

### Incorrect

Aucune bande n'est apparue ou une seule bande est visible sur 'T'. Veuillez procéder à un nouveau dépistage.

Ne pas réutiliser cet autotest à usage unique. Vous pouvez commander un nouveau test sur [fr.treated.com/ist/autotest-ist/gonorrhée](https://fr.treated.com/ist/autotest-ist/gonorrhée)

Produit fabriqué par :  
Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd

Produit distribué par :  
Linter Ltd.  
27 Gen. Kisetlov str., Varna, 9000  
Bulgarie

✉ [info@yourselftests.com](mailto:info@yourselftests.com)

🌐 [www.yourselftests.com](https://www.yourselftests.com)

# Dépistage Gonorrhée

Dépistage sûr et discret à réaliser chez soi

## Instructions

**Important :** Avant d'utiliser le test, veuillez lire attentivement les instructions.

### Composants du kit de dépistage

- ✓ Boitier de dépistage emballé individuellement
- ✓ Coton-tige stérilisé
- ✓ Bouteilles (Reagent 1, Reagent 2)
- ✓ Tube d'extraction en plastique avec bouchon

*Note : Pour réaliser le test, vous aurez aussi besoin d'une montre et d'une alarme.*

 **fr.treated.com®**

Notre équipe est à votre écoute ! Si vous rencontrez la moindre difficulté ou avez une question à poser, n'hésitez pas à contacter le fabricant à l'adresse [info@yourselftests.com](mailto:info@yourselftests.com). Vous pouvez aussi contacter notre service patient à [servicepatients@treated.com](mailto:servicepatients@treated.com)

# Introduction

**La Gonorrhée est une infection sexuellement transmissible causée par la bactérie *Neisseria gonorrhoeae*. L'infection est populairement connue sous le nom de chaude-pisse.**

La Gonorrhée est l'une des maladies les plus répandues au monde. Cette infection bactérienne se transmet le plus fréquemment pendant les rapports sexuels, y compris les rapports vaginaux, oraux et anaux. L'organisme responsable peut infecter la gorge, produisant un mal de gorge sévère. Elle peut également affecter l'anus et le rectum, produisant une condition appelée rectite. Même si la plupart des personnes infectées ne présentent aucun symptôme, elles peuvent ressentir une douleur ou brûlure lors de la miction, des saignements vaginaux entre les règles, des sécrétions vaginales accrues, souvent de couleur verte ou jaune, des démangeaisons et une sensation de brûlure au niveau du vagin. Une envie d'uriner chez les femmes et un écoulement du pénis associé à une envie d'uriner fréquente ainsi que des douleurs ou gonflements de l'un des deux testicules chez les hommes. La seule prévention consiste à avoir des relations sexuelles sans risque avec un préservatif, à veiller à n'avoir que des relations sexuelles avec un partenaire dont le test de dépistage est négatif ou de pratiquer l'abstinence. Pour les personnes sexuellement actives, le dépistage est recommandé au moins une fois par an. Après un test discret à domicile qui est identique pour les hommes et les femmes, une infection à la Gonorrhée peut être facilement guérie à l'aide d'antibiotiques.

## Important

- Avant d'utiliser le test, veuillez lire attentivement les instructions.
- Le test est à usage unique. Par conséquent, il est très important de lire et de comprendre l'ensemble des instructions avant de commencer le test. Veuillez suivre les instructions exactement telles que décrites dans la notice. Ne pas respecter les étapes peut engendrer un résultat erroné.
- Le kit doit être conservé à une température comprise entre 2°C et 30°C et ne pas dépasser la date de péremption.
- Le boîtier de dépistage doit rester scellé jusqu'à son utilisation.
- Ne convient pas à un usage interne. Veuillez éviter tout contact entre les mains et les yeux ou le nez pendant la réalisation du test. Ne pas manger, boire ou fumer à proximité du test.
- Le test ne doit pas être utilisé après la date de péremption indiquée sur l'emballage ou s'il a été ouvert ou endommagé.
- Ne pas réutiliser le test.
- Si vous êtes enceinte, n'utilisez pas les brosses de cytologie.

# Réaliser le test

**Etape 1 :** Veuillez soigneusement laver vos mains avec du savon et de l'eau tiède et les sécher avec une serviette propre.

**Etape 2 :** Si vous effectuez le test maintenant, ouvrez tous les emballages. Placez tout le matériel sur une surface propre et plane.

**Etape 3 :** (Femme) Ecartez le vagin avec 2 doigts et insérez le coton-tige dans le vagin. Si vous constatez des sécrétions vaginales visibles, utilisez le coton-tige stérile pour d'abord retirer l'excédent et insérez ensuite le même coton-tige dans le vagin, jusqu'à ce que l'extrémité ne soit plus visible.



**Etape 3 :** (Homme) Insérez le coton-tige stérile, 2 à 4 cm dans l'urètre.

**Etape 4 :** Tournez le coton-tige pendant environ 5 à 10 secondes.

**Etape 5 :** Placez le coton-tige dans le tube à éprouvette.

**Etape 6 :** Ajoutez 8 gouttes de la bouteille 1 dans le tube.

**Etape 7 :** Simultanément, pressez le tube 15 fois et faire tourner le coton-tige.

**Etape 8 :** Laissez le coton-tige dans le tube pendant 2 minutes.

**Etape 9 :** Ensuite, ajoutez 8 gouttes de la bouteille 2 dans le tube.

**Etape 10 :** Une nouvelle fois, veuillez simultanément presser le tube 15 fois et faire tourner le coton-tige.

**Etape 11 :** Retirez le coton-tige tout en pressant le tube autour du coton-tige pour extraire tout le liquide. Refermez le tube avec le bouchon fourni.

**Etape 12 :** Versez 2 gouttes provenant du tube sur la zone d'échantillon (S) du boîtier de dépistage.

Le résultat du dépistage sera lisible dans un délai de 10 à 15 minutes (attention à ne pas dépasser ce délai pour lire les résultats).

Notre équipe est à votre écoute ! Si vous rencontrez la moindre difficulté ou avez une question à poser, n'hésitez pas à contacter le fabricant à l'adresse **info@yourselftests.com**. Vous pouvez aussi contacter notre service patient à l'adresse **servicepatients@treated.com**