

PRÉLÈVEMENT SANGUIN

Instructions pour le prélèvement d'échantillons









Avant d'effectuer votre prélèvement, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

Complétez l'étiquette fournie au stylo avec les informations suivantes

- Votre nom
- Votre prénom
- Votre date de naissance
- La date de prélèvement

N'apportez l'étiquette sur le tube de prélèvement sanguin qu'après avoir prélevé votre échantillon. Cette étape est importante, car vous ne pourrez pas voir la quantité de sang prélevée si l'étiquette recouvre les côtés du tube. L'auto-prélèvement de l'échantillon est effectué aux risques et périls de l'individu.

Le contenu de votre kit de prélèvement

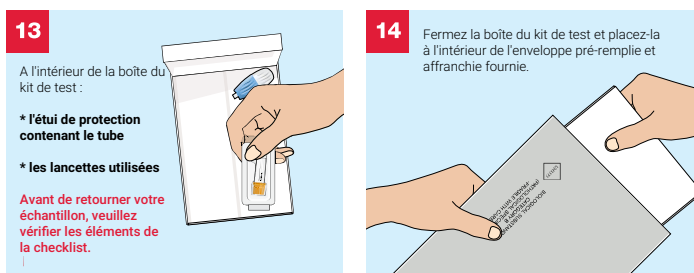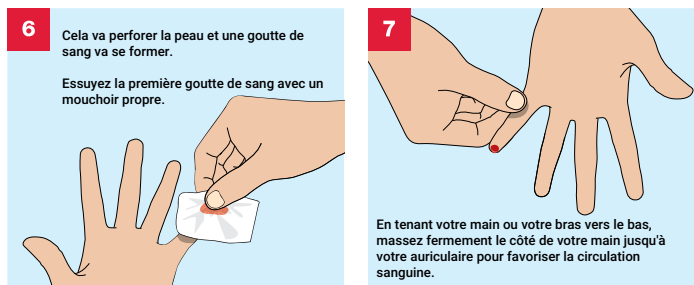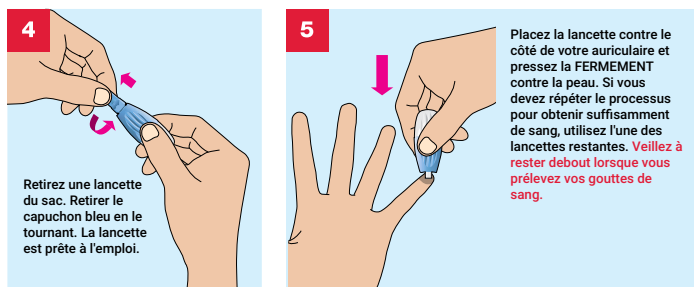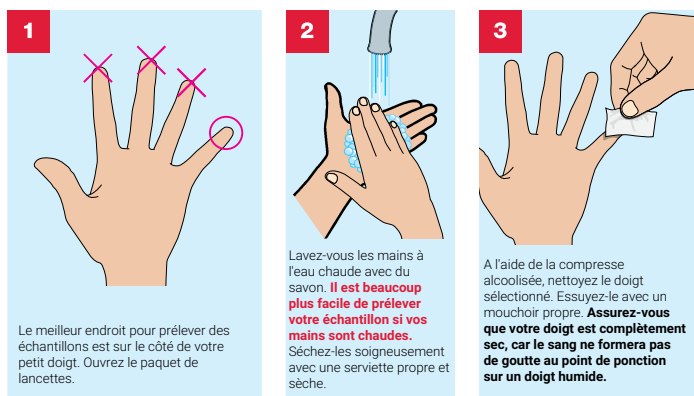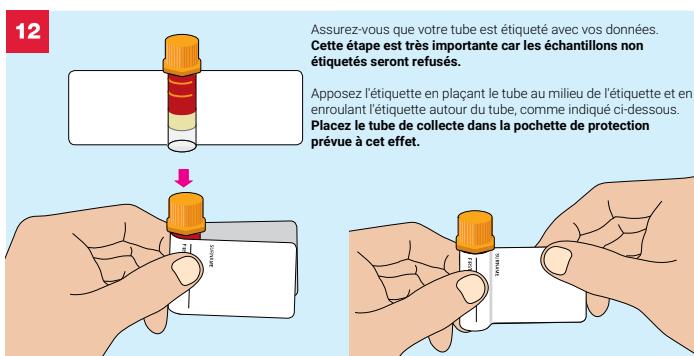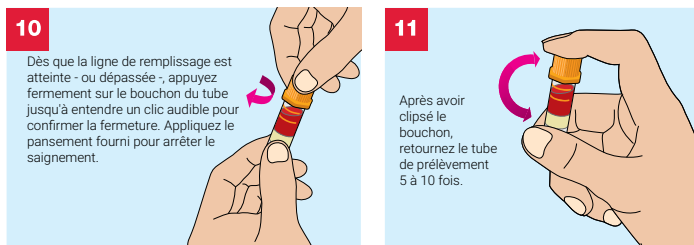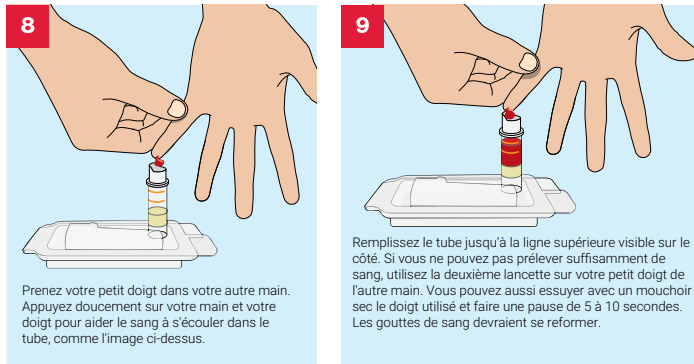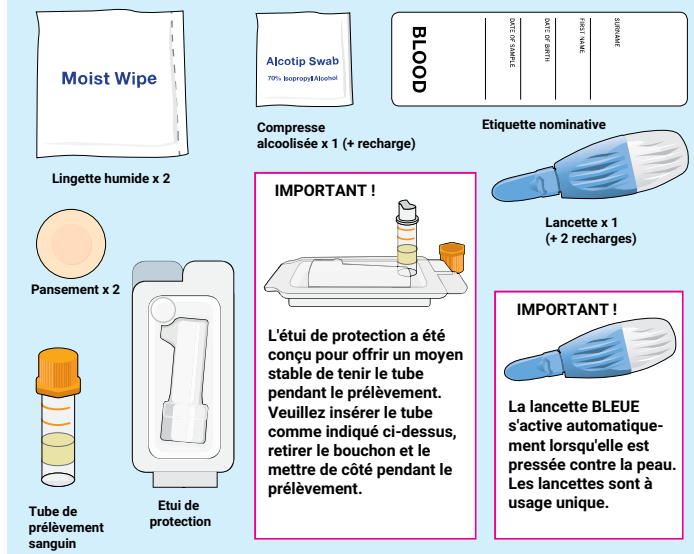

CHECKLIST

Avant de renvoyer votre échantillon, vérifiez le contenu de l'enveloppe en cochant les éléments de la checklist.

- ☐ Formulaire de demande complété
- ☐ Tube de prélèvement dans son étui de protection
- ☐ Lancettes utilisées
- ☐ Échantillon placé dans la boîte du kit

Si vous avez des difficultés à prélever suffisamment de sang pour remplir le tube jusqu'à la ligne, rapprochez-vous de votre médecin pour vous aider.

En cas de besoin, contacter le service patient au +44 207 043 2054 ou à servicepatients@treated.com. Si vous souhaitez retourner les lancettes non utilisées, joignez-les avec votre prélèvement.