


Interpretacja wyników testu

W ciągu 15 minut w okienku kontrolnym na płytce może pojawić się jedna lub dwie linie lub może nie pojawić się żadna linia.

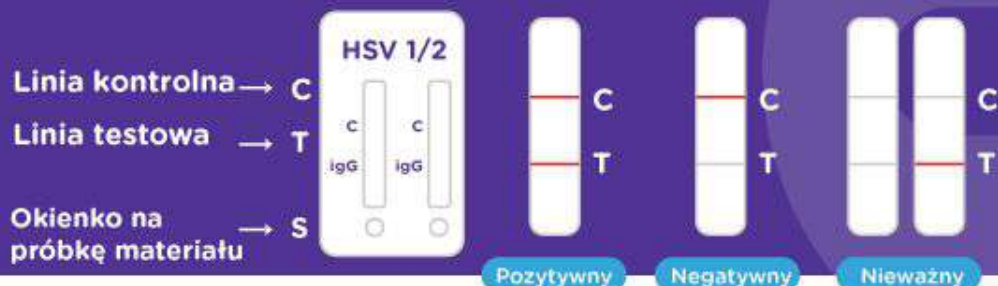

Pozytywny (+)

W okienku kontrolnym pojawiają się dwie linie obok liter (C) i (T). Oznacza to zakażenie opryszczką. Należy wówczas zgłosić się do lekarza lub laboratorium w celu wykonania dalszych badań.

Negatywny (-)

W okienku kontrolnym na płytce testowej pojawi się tylko jedna linia obok litery (C). Oznacza to brak wirusa opryszczki. Aby potwierdzić ten wynik, zaleca się wykonanie kolejnego testu.

Nieważny

Jeżeli w okienku kontrolnym na płytce testowej nie pojawia się żadna linia lub pojawia się jedna linia obok litery (T). Należy wówczas powtórzyć wykonanie badania korzystając z nowego testu.

Każdy test służy do jednorazowego użytku. Nowy test można zamówić na stronie pl.treated.com/testy-na-choroby-weneryczne

Wyprodukowano przez:
Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd

Dystrybutor:
Lintor Ltd.
27 Gen. Kisetlov st, Varna, 9000
Bułgaria

✉ info@yourselftests.com

🌐 www.yourselftests.com

Test na opryszczkę

Bezpieczny i dyskretny sposób na wykonanie badania w domu

Instrukcja

Ważne: przed wykonaniem testu, należy uważnie przeczytać treść instrukcji.

Zawartość opakowania testowego

- ✓ Płytki testowej osobno zapakowanej
- ✓ Lancet do nakłucia palca
- ✓ Wacik nasączony alkoholem
- ✓ Roztwór buforowy
- ✓ Pipeta

Uwaga: do wykonania testu potrzebne będą także zegarek, budzik lub stoper do odmierzenia czasu.

 pl.treated.com[®]

Jeżeli w trakcie wykonywania testu pojawiają się wątpliwości lub potrzebna będzie pomoc, zapraszamy do kontaktu mailowego, pisząc do nas na kontakt@treated.com lub do producenta testu na info@yourselftests.com

Wprowadzenie

Opryszka jamy ustnej lub narządów płciowych należy do chorób przenoszonych drogą płciową, którą wywołuje wirus *Herpes simplex*.

Częstymi objawami zakażenia jest uczucie pieczenia lub bólu podczas oddawania moczu, swędzenie i podrażnienie wokół narządów płciowych, czerwona wysypka lub pęcherze w miejscach trudno widocznych, np. wokół odbytu lub szyjce macicy. Choroba ta, u osób, od których można się zarazić wirusem, może przebiegać bezobjawowo lub mieć tylko łagodne objawy, które można pomylić z innymi schorzeniami skóry.

Ważne

- Przed wykonaniem testu, należy uważnie przeczytać treść instrukcji.
- Jest to test przeznaczony do jednorazowego użytku, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z instrukcją na temat jego stosowania oraz zrozumienie, co należy zrobić przed rozpoczęciem badania. Instrukcje należy wykonywać dokładnie zgodnie z opisem. W przeciwnym razie wynik badania może być niepoprawny.
- Zestaw do badania należy przechowywać w temperaturze od 2 do 30°C. Nie należy stosować po upływie terminu ważności nadrukowanej na saszetce.
- Płytkę testową należy przetrzymywać w zapieczętowanej saszetce do czasu rozpoczęcia badania.
- Tylko do użytku zewnętrznego. Podczas wykonywania badania, należy unikać kontaktu rąk z oczami lub nosem.
- W pobliżu testu, nie należy palić tytoniu, jeść, ani pić.
- Nie należy używać testu po upływie daty ważności, ani gdy opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.
- Nie należy powtórnie wykorzystywać tego testu.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, można się z nami skontaktować pisząc na adres kontakt@treated.com lub na adres producenta testu info@yourselftests.com

Uwaga: Jeżeli objawy zakażenia utrzymują się, niezależnie od wyniku badania, radzimy skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym.

Wykonywanie testu

- 1 Test należy wyjąć z opakowania tylko w momencie wykonywania testu i wyłożyć jego wszystkie elementy na czystej płaskiej powierzchni.
- 2 Przed rozpoczęciem wykonywania badania (nakłuciem palca) należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem, opłukać je wodą i wytrzeć do sucha czystym ręcznikiem. Należy następnie usiąść i spróbować się zrelaksować przez pięć minut, rozcierając w tym samym czasie ręce. Palec nie powinien być zimny, ani pokryty odciskami lub zgrubiałą skórą. Miejsce nakłucia należy przetrzeć wacikiem nasączonym alkoholem.
- 3 Następnie należy zdjąć ochronną nasadkę z igły.
- 4 Dłoń, która zostanie użyta do nakłucia, należy położyć na płaskiej powierzchni (np. stole). Osoby leworęczne powinny nakłuć palec środkowy lub serdeczny lewej dłoni, a osoby praworęczne te same palce prawej dłoni. Zalecamy wykonać nakłucie opuszka palca, z boku, który jest najbliższy małego palca.
- 5 Lancet do nakłucia palca (igłę) należy umieścić w odpowiednim miejscu i przycisnąć, aby wykonać nakłucie. **Nie należy eksperymentować i wypychać igły przed umieszczeniem lancetu na palcu.**
- 6 Pierwsze krople krwi należy zetrzeć chusteczką, a następnie zwiesić ramię do dołu na 10 sekund, aby poprawić przepływ krwi.
- 7 Należy pobrać dwie krople krwi przy użyciu mikropipety oraz umieścić je w okienku oznaczonym literą (S) na płytce testowej.
- 8 Później należy zdjąć nakrętkę z butelki z roztworem i ostrożnie zakropić 2 krople płynu do okienka oznaczonego literą (S). Należy upewnić się, że płyn dosięga linii kontrolnej.
- 9 Po pobraniu próbki, należy wytrzeć palec chusteczką lub ręcznikiem papierowym i zakleić miejsce ułucia plastrem, jeśli jest to konieczne.

Wynik badania można odczytać po upływie 10-15 minut (nie należy odczytywać wyniku później). Jeżeli objawy choroby utrzymują się, niezależnie od wyniku badania, radzimy skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym.